

medical line



**ORLETT**

ВЕРНЕТ РАДОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению  
ортопедических изделий

**БАНДАЖ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ**

**РКН-103**

[WWW.ORLETT.RU](http://WWW.ORLETT.RU)

## СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

---

Бандаж Orlett на коленный сустав для фиксации надколенника, арт. PKN-103, осуществляет поддержку коленного сустава за счет фиксации сухожилий четырехглавой мышцы бедра; фиксирует ткани коленного сустава в области бугристости большой берцовой кости и стабилизирует коленный сустав.

Компрессионный и массажный эффекты бандажа способствуют ускорению выздоровления при воспалении сухожилий.

Отпускается без рецепта.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

---

- тендинит (воспаление) собственной связки надколенника (коленной чашечки);
- остеохондропатия бугристости большеберцовой кости (болезнь Осгуда–Шлаттера);
- привычный (повторяющийся) вывих надколенника (коленной чашечки);
- профилактика вывиха надколенника (коленной чашечки) при повышенных нагрузках на коленный сустав;
- профилактика травматизма при профессиональных и спортивных нагрузках на коленный сустав.

## РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

---

Режим и сроки ношения бандажа назначает лечащий врач. Для профилактики травм и заболеваний суставов рекомендованный режим: при нагрузках на суставы (спортивных, производственных).

Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

## ПРОТИВПОКАЗАНИЯ

---

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойные заболевания и заболевания кожи в области применения бандажа.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Людам, имеющим заболевания кожи, перед использованием биндажа необходимо проконсультироваться с врачом.

При возникновении какого-либо физического дискомфорта или раздражения следует немедленно прекратить использование биндажа и проконсультироваться с врачом о возможности его дальнейшего применения.

## КОНСТРУКЦИЯ

Биндаж Orlett на коленный сустав для фиксации надколенника, арт. PKN-103, состоит из следующих элементов:

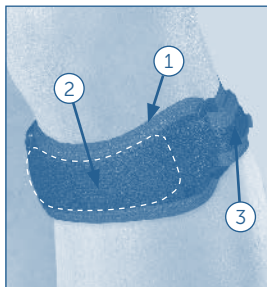

1. Манжета.
2. Гелевая вставка.
3. Фиксирующий ремень с застежкой велкро.

## ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

Биндаж можно надевать непосредственно на тело.

Биндаж Orlett, арт. PKN-103, надевается на коленный сустав: гелевую вставку совместить с областью бугристости большеберцовой кости. Отрегулировать степень компрессии биндажа с помощью фиксирующего ремня с застежками-липучками велкро.

## ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать ремень-фиксатор слишком сильно во избежание нарушения кровообращения.

## ПРАВИЛА ПОДБОРА

Бандаж имеет универсальный размер: обхват ноги на 5 см ниже коленного сустава, до 40 см.

## ПРАВИЛА УХОДА

Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.

Для изделий со съёмными или отстёгивающимися каркасами, шинами, рёбрами жёсткости или шарнирами: отсоединять данные съёмные элементы перед стиркой! После полного высыхания изделия следует вернуть их обратно.



## СОСТАВ

50% полихлоропрен, 25% полиамид, 7% полиэстер, 5% этиленвинилацетат, 3% эластан, 10% полиэтилен.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Бандаж должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Бандаж утилизировать с бытовым мусором.

## СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования бандажа дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования бандажа без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции бандажа. Не допускается эксплуатация поврежденного бандажа.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

---

Ортопедическое изделие арт. PKN-103, инструкция по применению.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

---

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

## **ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ**

---

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

**К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА  
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ**

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09550 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.АЯ46.Д74410 (с 12.04.2017 г. по 12.04.2020 г.) выдана ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию».

**Производитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамерштрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.



